

RIKTLINJE

 RUTIN

Dokumentnamn: Lokal rutin för rengöring av hjälpmedel/ medicintekniska produkter				
Framtagen av: Åsa Rydberg, MAR Eva-Karin Stenberg, MAS Margaretha Norell Pejner, MAS	Gäller from: 2022-01-01	Gemensam med Regionen: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej	Gäller egen regi: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej Gäller privat regi: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej Gäller intraprenad: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Process hänvisning:
Godkänd av:	Gäller tom: <i>Ange datum eller skriv tillsvidare, lämna ej rutan tom</i>			
Uppdaterad av: Åsa Rydberg, MAR	Uppdateringsdatum: 2023-08-18			

Revisionshistorik

Datum för revidering och uppdatering	Beskrivning
2022-01-01	Rutinen är ny och utgår ifrån anvisningar från Vårdhygien, Region Halland
2023-08-18	Genomgång av innehåll och uppdatering av länkar.

Tillvägagångssätt

Smittämnen kan spridas via material och hjälpmedel som indirekt kontaktsmitta. Det finns olika sätt att minska mängden smittämnen på material och hjälpmedel.

- **Rengöring-** dvs noggrann bearbetning med rengöringsmedel och vatten. Denna metod är vanligtvis tillräcklig då hjälpmedlet är individuellt ordinerat av leg. personal.
- **Tvätt-** Hjälpmedel i textil eller delar av textil, så som överdrag till sittdynor, ska tvättas i minst 60 grader. Se anvisningar från tillverkaren.
- **Desinfektion-** Vid förorening av kroppsvätska, vid vissa specifika smittämnen (se [anvisningar från Vårdhygien, Region Halland](#)) eller om hjälpmedlet används av flera personer räcker inte enbart rengöring. Hjälpmedlet behöver då även desinfekteras med alkoholbaserat desinfektionsmedel med tensid. Vid en desinfektion reduceras mängden smittämnen så att smittspridning inte kan ske.

Rengöring av vanligt förekommande hjälpmedel:

Hjälpmedel	Rengöringsrutin
Rullstol	<ul style="list-style-type: none"> • Bedömning görs en gång i veckan om hjälpmedlet ska rengöras.

	<ul style="list-style-type: none"> • Hela stolen inkl. sittenheten rengörs med rengöringsmedel och vatten. • Kontrollera däck samt att bromsarna fungerar som de ska. • Kontrollera länkhjul (de små framhjulen) där hår och annan smuts kan fastna och göra stolen svår att köra. • Är rullstolsdynan/dynöverdraget i textil ska tyget tvättas en gång i veckan (och oftare vid behov) i 60 grader maskintvätt.
Personlyft och lyftsele	<ul style="list-style-type: none"> • Taklyft ska rengöras en gång i veckan (eller oftare vid nedsmutsning) med rengöringsmedel och vatten. • Då akutlyft har använts ska lyft och sele rengöras direkt efter användandet. Används golvlyft av flera patienter ska den desinfekteras med alkoholbaserad ytdesinfektion med tensid mellan varje patient. • Lyftselen (individuell) ska tvättas en gång i veckan enl. tillverkarens anvisning (finns på selen) samt oftare vid behov.
Vårdarbälte	<ul style="list-style-type: none"> • Rengörs en gång i veckan. • Tvättas enl. tvättråd i minst 60 grader.
Sängar	<ul style="list-style-type: none"> • Rengöring av sängstomme sker med rengöringsmedel och vatten en gång i veckan och oftare vid behov. • Rengöring av madrass; se tvättråd.
Övriga hygienhjälpmedel såsom mobil hygienstol, duschpall, toalettförhöjning	<ul style="list-style-type: none"> • Rengöring efter varje patient (om hjälpmedlet används av flera personer) • Rengöring sker genom att hjälpmedlet spolats av och torkas torr och desinfekteras därefter med alkoholbaserad ytdesinfektion med tensid.
Rollator	<ul style="list-style-type: none"> • Rengöring sker med rengöringsmedel och vatten. • Kontrollera att det inte finns hår eller annan smuts runt hjulen. • Kontrollera bromsarna efter rengöring.

Bakgrund

Hjälpmedel/ Medicintekniska produkter ska skötas och underhållas enl. tillverkarens anvisning. Hjälpmedel ska rengöras och desinfekteras så att de inte bidrar till smittspridning. Om ett hjälpmedel används av flera personer (grundutrustning) ska rengöring och desinfektion ske efter varje användare.

Syftet med rutinen är att tydliggöra hur hjälpmedel/medicintekniska produkter ska rengöras för att hålla dessa i ett bra skick och undvika smitta.

Rutinen gäller både för individuellt förskrivna hjälpmedel samt grundutrustning.

Ansvar/Omfattning

Enhetschef

- Att den lokala rutinen efterföljs.
- Att personal följer tillverkarens råd och riktlinjer för hur hjälpmedlet/medicintekniska produkten ska användas och skötas.
- Ansvarig chef kan ta hjälp av enhetens rehabombud (om uppdraget finns i verksamheten) i delar av uppdraget.

Medarbetare

- Att inköpta och ordinerade hjälpmedel/medicintekniska produkter rengörs enl. lokal rutin.
- För individuellt förskrivna hjälpmedel ansvarar patientens kontaktperson för rengöring enl. rutin.
- Vid en upptäckt slitage/trasigt ordinerat hjälpmedel ska kommunrehab kontaktas.
- Vid en upptäckt slitage/trasig grundutrustning ska ansvarig enhetschef kontaktas.

MAS/MAR

- Att rutinen är uppdaterad.

Referensdokument

- [SOSFS 2015:10 Basal hygien i vård och omsorg, Socialstyrelsen](#)
- [Anvisningar, Vårdhygien kommunala vårdgivare, Vårdhygien, Region Halland.](#)